

# gripSAFE




Pierwszy w Polsce wielorazowy bezpieczny trzonek do ostrzy chirurgicznych

antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie



blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza

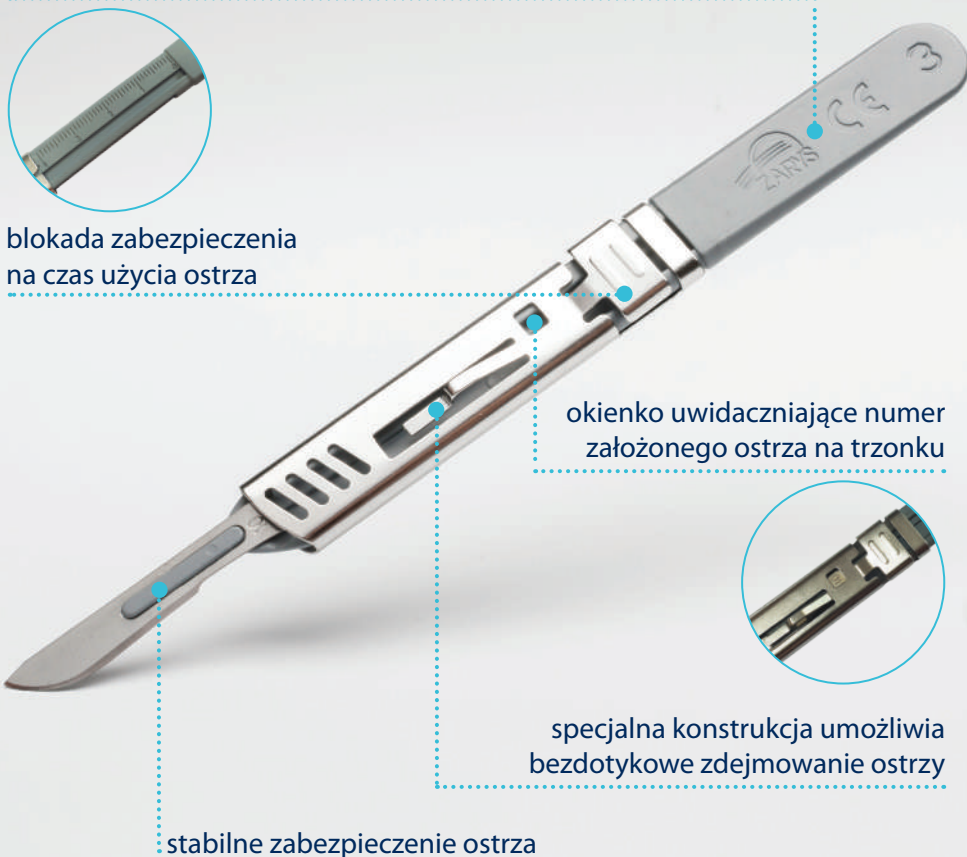

dostępny także w wersji **LONG**

okienko uwidaczniające numer założonego ostrza na trzonku



specjalna konstrukcja umożliwia bezdotykowe zdejmowanie ostrzy


stabilne zabezpieczenie ostrza

# Zaprojektowany by zapobiegać skaleczeniom skalpelem


- Możliwość założenia dowolnego rozmiaru ostrza.
- Stabilne zabezpieczenie ostrza.
- Możliwość całkowitego odblokowania zabezpieczenia na czas użycia skalpela.
- Specjalna konstrukcja umożliwiająca zabezpieczenie ostrza pomiędzy użyciem.
- Produkt wielorazowego użytku - możliwość sterylizacji parowej lub tlenkiem etylenu.
- Specjalna konstrukcja umożliwiająca bezpieczne, bezdotykowe zdejmowanie ostrzy.
- Zapewnia bezpieczne środowisko pracy.

Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy Rady 2010/32/EU z dnia 10 maja 2010 roku.

## Instrukcja użycia

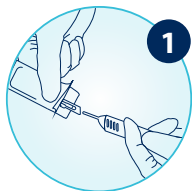

1  
załóż dowolne ostrze na trzonek (uwzględniając odpowiedni numer trzoneka do rozmiaru ostrza)

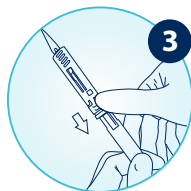

3  
odbiepiez ostrze naciskając kciukiem przycisk blokujący i przesuwając osłonkę w dół trzoneka, aż do momentu zablokowania osłonki w chwycie



2  
zabezpiecz ostrze naciskając kciukiem przycisk blokujący i przesuwając osłonkę w stronę ostrza



4  
po zakończonej pracy odblokuj osłonkę naciskając przycisk blokujący, a następnie dociskając kciukiem przycisk znajdujący się w środkowej części osłonki, zdecydowanym ruchem przesunij osłonkę w stronę ostrza

**rozmiar 3** kompatybilny z ostrzami 6-16    **rozmiar 4** kompatybilny z ostrzami 18-36

numer katalogowy	rozmiar	opakowanie handlowe
TBNR3	3 / standardowy	5 szt.
TBNR4	4 / standardowy	5 szt.
TBNR3-L	3 / przedłużany	<b>LONG</b> 5 szt.
TBNR4-L	4 / przedłużany	<b>LONG</b> 5 szt.



ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.  
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
tel. 32 376 07 20, [www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)

Patrycja Czabok  
tel. +48 506 194 518  
e-mail: [patrycja\\_czabok@zarys.com.pl](mailto:patrycja_czabok@zarys.com.pl)